


ИНСТРУКЦИЯ

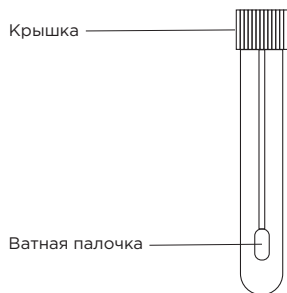


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА

При температуре до +50°C.


Биоматериал хранится в течение 2-х месяцев с момента сбора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


Не вскрывайте пробирку до начала сбора биоматериала. После сбора образца не ставьте пробирку на дно, храните её горизонтально. Ватная палочка прикреплена к крышке для более удобного сбора биоматериала.

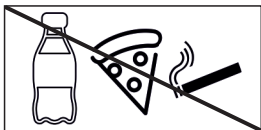

1. Ополосните рот небольшим количеством чистой воды. Затем, в течение 30 минут не ешьте, не пейте, не жуйте жевательную резинку, не целуйтесь и не курите. Не рекомендуется сбор биоматериала натошак.

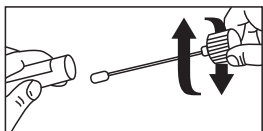


2. По истечении 30 минут после полоскания аккуратно открутите крышку пробирки. К крышке прикреплена ватная палочка. Не прикасайтесь ватной палочкой ни к чему, кроме области сбора биоматериала – это может испортить образец.

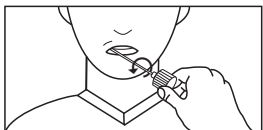


3. Интенсивно потрите слизистую ватной палочкой в углублении между десной и щекой в течение как минимум 30 секунд. Плотно прижимайте палочку к внутренней поверхности щеки.




4. Прижмите ладонь к щеке снаружи. Сила нажима должна быть такой, чтобы движения палочки были хорошо ощутимы ладонью с внешней стороны. Тереть нужно как можно большую площадь слизистой.

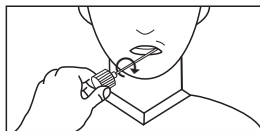


5. Повторите те же действия со второй щекой. Следите за тем, чтобы палочка не касалась ничего, кроме слизистой. Во время трения периодически прокручивайте палочку вокруг оси так, чтобы она соприкасалась со слизистой всей поверхностью.

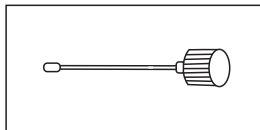

6. Положите на стол лист чистой бумаги. Не прикасаясь ватной палочкой к другим поверхностям, положите её на этот лист бумаги для высыхания в течение 20-30 минут. Не ставьте зонд вертикально на крышку, это уменьшит скорость высыхания.

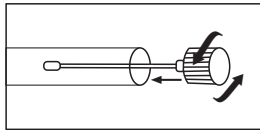

7. Повторите пункты 3-4-5-6 для второй пробирки с ватной палочкой. Аккуратно, не прикасаясь ватной палочкой к другим поверхностям, кроме пробирки, поместите палочку в пробирку и плотно закрутите крышку.

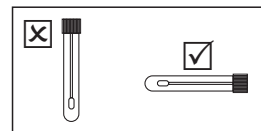

8. После сбора образца, нельзя ставить пробирку на дно в течение 9 часов. Это препятствует высыханию и может привести к плохому выделению ДНК. В таком случае образец придётся собирать повторно. Положите пробирку горизонтально.

9. Заполните анкету.

10. Отнесите ваш образец (2 пробирки с ватными палочками) и анкету для дальнейшего исследования в любой филиал АО «Северо-Западный Центр доказательной медицины» или вызовите курьера на дом по телефону: **+7 (800) 234-42-00**

Список адресов филиалов можно узнать на сайте: **www.cdmed.ru**

СТОИМОСТЬ ТЕСТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Актуальная цена указана на сайте. Оплата производится любым удобным для Вас способом: в офисах компании; курьеру в момент передачи биоматериала; на официальном сайте.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

При возникновении уточняющих вопросов используйте только официальные контакты компании.